

## Návod k použití


### Příprava rány a její okolí

- Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché.
- Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže, abyste zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem krytí i s fixačními proužky.

### Podmínky pro správné umístění krytí na ránu


- Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí, nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru 16x21 cm je určeno k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).
- Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.

**Avelle™**  
Pozitivní síla podtlakové terapie

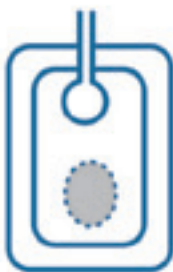

- Postarejte se, aby pokožka před aplikací byla suchá a odmaštěná.
- Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
- Odstraňte ochrannou fólii.

- Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval na neporušené kůži.
- Zajistěte, aby byl umístěn vždy nad ránou. Vytékající tekutina se tak nemůže dostat do odsávací trubičky, která zajišťuje potřebný podtlak.
- Ujistěte se, že rána je uprostřed krytí a dostatečně daleko od adhezivních okrajů.

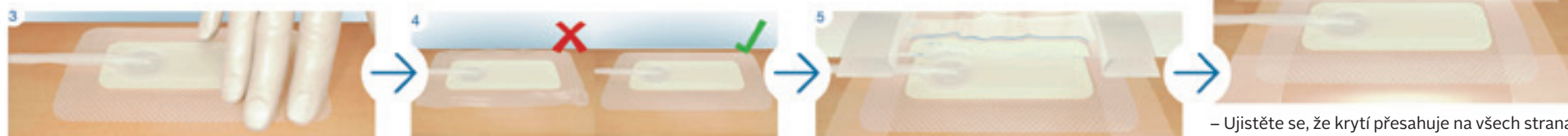

- Uhladte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.
- Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy neporušíte přilnavost krytí.

- Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit těsnění a funkčnost celého systému.

- Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky ze všech čtyř stran.
- Nejprve odstraňte centrální ochrannou fólii označenou „1“. Přiložte fixační proužek a odstraňte části označené „2“. Nakonec odstraňte horní díl označený „3“.

- Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech stranách minimálně o 1cm na neporušenou okolní kůži.
- Zkontrolujte, že po aplikaci zůstaly všechny hadičky volně průchozí.
- Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění krytí po celou dobu jeho použití.

1. Aplikace krytí

2. Připojení pumpy



Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Hadičky lze připojit jednoduchým kroutivým pohybem. Nepřetočte závit, došlo by k poškození úchyty. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě.

3. Aplikace podtlaku



Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte. Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat. Asi za 3 sekundy se docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat.

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte případné záhyby a vrásky. Zkontrolujte připojení hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, krytí se zploští.


#### 4. Výměna krytí

Interval výměny krytí vždy určuje ošetřující zdravotník. Dalším důvodem k výměně by byla ztráta funkčnosti, např. podtékání, shromažďování tekutiny kolem ústí portu nebo při ztrátě adheze.

- Běžný interval výměny je 3–4 dny, maximální je 7 dní.
- Vypněte pumpu stisknutím a přidržení modrého tlačítka po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou hadičku od krytí a poté přistupte k výměně krytí.



Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte adhezi a můžete krytí sejmut.

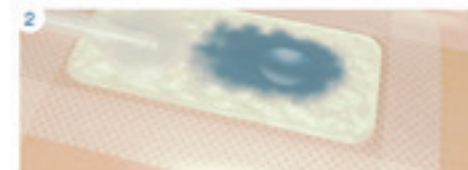

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane k portu krytí.

#### 5. Výměna pumpy



- Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu 30 dnů od zahájení podtlakové terapie.
- Je možné, že v průběhu 30 dní bude nutné vyměnit baterie.
- Pokud se rozsvítí žluté světlo je potřeba vyměnit baterie.



Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou pumpu a nové hadičky.

#### 6. Výplně ran, kontaktní vrstvy, komprese



U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít normální gáza. Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně kompresní bandáže.

Pokud budete používat systém Avelle™ v kombinaci s kompresní terapií, dbejte na to, aby hadičky byly vždy umístěny na vnější straně bandáže.

### Víte, že...

je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem? V případě, že odpojíte pumpu krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut.\*

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

### Potřebujete více informací?

Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle™. Tento Návod k použití obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či používání systému podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Pro více informací o systému podtlakové terapie Avelle™ volejte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 122 111. Na tomto čísle je také možné domluvit si návštěvu obchodního zástupce.

\*Jak bylo dokázáno testem in vitro

**Jediný systém kombinující podtlakovou terapii ran s technologií Hydrofiber™**

**Avelle™**  
Pozitivní síla podtlakové terapie



[convatec.cz](http://convatec.cz)

