

JAK POUŽÍVAT JEDNODÍLNÝ SYSTÉM ESTEEM®+ TVAROVATELNÝ

1. Postup tvarování a nasazení

Mějte na paměti, že před nalepením podložky musí být kůže čistá, suchá a v případě potřeby oholená.



Oddělte tvarovatelnou část od sáčku.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 1. Odkryje se vám tvarovatelná část.



Rolujte a tvarujte otvor do požadované velikosti, která bude odpovídat velikosti stomie. **Hmotu nenatahujte, nestříhejte.**



Zkontrolujte vytvarovaný otvor přiložením ke stomii.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 2.



Přilepte na kůži tak, aby vytvarovaný otvor jemně a přitom těsně obemknul stomii. Přitlačte hmotu, aby dobře přilnula ke kůži. Kůže před nalepením musí být čistá, suchá a v případě potřeby oholená.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 3.



Odstraňte ochrannou fólii z lepicí části stomického sáčku.




9

Sáček přehněte zhruba v polovině a začněte nalepovat od dolní poloviny směrem nahoru.



10

Sáček přitiskněte k tělu a přidržte po dobu cca 30 sekund, aby stomická pomůcka dobře přilnula po celé ploše.

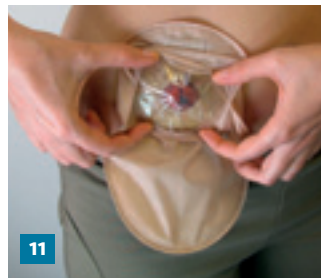

11

Pomocí okénka zkontrolujte správné nalepení pomůcky.

KOMBINUJE VÝHODY TVAROVATELNÉ TECHNOLOGIE...

- pružná manžetka se přizpůsobí tvaru a velikosti stomie
- eliminace podtékání
- hmota se tvaruje, nemusí se stříhat nůžkami
- zdravější kůže v okolí stomie



...A JEDNODÍLNÉHO SYSTÉMU

- diskrétní
- flexibilní
- příjemný
- jednoduchý



Esteem®+ tvarovatelný je určen **pacientům s kolostomií nebo ileostomií, jejichž stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.**

KÓD

NÁZEV

VELIKOST
KROUŽKU/STOMIE

KUSŮ
V BALENÍ

Sáčky Esteem®+ tvarovatelné uzavřené

0170805	Sáček béžový, standard, filtr
0170806	Sáček béžový, standard, filtr
0170807	Sáček béžový, standard, filtr

20–30 mm	30
30–40 mm	30
40–50 mm	30